

IzyCHAIR



CE



Encuentre este modo de empleo en
www.logo-silver.fr

ULTRALIGERA Y COMPACTA

PRÁCTICA Y FÁCIL DE MONTAR Y DESMONTAR PARA VIAJAR.

LOGO  SILVER
by **AMYLOR**

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN.....	4
II. SEGURIDAD	5
2.1 FECHA DE CADUCIDAD	5
2.2 INSTRUCCIONES ANTES DEL PRIMER USO	5
2.3 ATENCIÓN DURANTE EL USO	5
2.4 INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS	6
III. ESQUEMA Y RENDIMIENTO	7
3.1 ESQUEMA DE LA IZYCHAIR	7
3.2 ESQUEMA ELÉCTRICO DE N5519.....	8
3.3 VERSIÓN DEL SOFTWARE DEL PRODUCTO	8
IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	9
V. INSTALACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE.....	10
5.1 AJUSTE.....	10
5.2 PLEGADO Y ALMACENAMIENTO.....	10
5.3 PUESTA A PUNTO	11
VI. USO Y FUNCIONAMIENTO.....	12
6.1 USO.....	12
6.1.1 CONTROLADOR.....	12
6.1.2 USO DE LA BATERÍA	13
6.1.3 CARGAR LAS BATERÍAS.....	13
6.1.4 SOBRECARGA	14
6.1.5 PALANCA DE FRENO	14
6.1.6 CINTURÓN DE SEGURIDAD.....	14
6.2 FUNCIONAMIENTO	14
6.2.1 PREPARACIÓN ANTES DEL FUNCIONAMIENTO	14
6.2.2 PRÁCTICA ANTES DEL FUNCIONAMIENTO	15
VII. FALLO DE DIAGNÓSTICO Y CORTOCIRCUITO	16

VIII. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE ACCIDENTES	17
IX. MANTENIMIENTO	17
9.1 HUMEDAD	17
9.2 TEMPERATURA	17
9.3 REGLAS GENERALES.....	17
9.4 MANTENIMIENTO DESPUÉS DEL USO.....	18
9.5 COMPROBACIONES DIARIAS	19
9.6 LIMPIEZA	19
X. REPARACIONES.....	19
XI. ALMACENAMIENTO	20
XII. APERTURA Y VERIFICACIÓN.....	20
XIII. GARANTÍA	21
13.1 GARANTÍA DE CINCO AÑOS.....	21
13.2 CUBIERTO POR LA GARANTÍA.....	21
13.3 NO CUBIERTO POR LA GARANTÍA	21

I. INTRODUCCIÓN

Lea y siga todas las instrucciones, avisos y notas de este manual antes poner en funcionamiento su silla de ruedas por primera vez. Si hay alguna información en este manual que no entienda o bien necesita ayuda adicional para el montaje u operatividad de la silla, por favor, póngase en contacto con su proveedor local autorizado.

Los símbolos definidos más abajo se usan para señalar las precauciones e informaciones importantes. Todas son muy importantes para su seguridad. Se recomienda vivamente leerlas y entenderlas totalmente.



¡ATENCIÓN!

No respetar los avisos de este manual puede resultar en daños personales.



¡PRECAUCIÓN!

No seguir las precauciones descritas en este manual puede resultar en daños en la silla IZYCHAIR.

La IZYCHAIR integra la tecnología avanzada y el estilo moderno. Su armazón, fácil de montar y desmontar, es muy adecuado para guardar la silla o colocarla en el maletero de su vehículo cuando viaja. Estamos seguros de que sus características de diseño, sus excelentes prestaciones y su funcionamiento sin problemas le garantizarán una vida diaria más práctica.

La IZYCHAIR es adecuada para todas las personas con discapacidad, personas mayores y enfermos que tengan dificultades en caminar. El peso máximo del usuario es de 100kg.

Esta es una silla de ruedas eléctrica de tipo interior, Modelo N5519. Aquí, "N" indica que es una IZYCHAIR de interior, "5" es el código de la categoría del producto, "216" es el número de serie de este modelo.

Esta es una silla de ruedas eléctrica interior, adecuada para un uso interior y sobre caminos planos alrededor de inmuebles, pero no sobre césped, grava, grandes pendientes o autopistas, ni en condiciones de lluvia o nieve.

II. USO DE SEGURIDAD

2.1. FECHA DE CADUCIDAD

La IZYCHAIR es un producto reutilizable y antibacteriano, sin sustancias químicas. La seguridad de la silla y el período de validez para su uso clínico no dependen sólo de la solidez estructural de los productos; también dependen del funcionamiento y uso que le dé el usuario, del entorno del producto, de los hábitos del usuario, de si se realiza un mantenimiento periódico o no y de otros factores adicionales.

Nuestros productos son válidos durante 7 años a partir de la fecha de su fabricación.

2.2 INSTRUCCIONES ANTES DEL PRIMER USO

- El usuario debe leer y entender totalmente este manual.
- La capacidad máxima de peso es de 100kg. Se ruega no sobrecargar la silla. Sólo puede conducir una persona a la vez. Se ruega no llevar pasajeros.
- Se ruega no conducir cuando se está cansado o bajo los efectos del alcohol.
- No conduzca de noche o en caso de baja visibilidad.
- Si va a conducir por primera vez, se ruega realice una autoevaluación antes de conducir y consulte las secciones de este manual 5.3 «Puesta en Marcha» y 6.2.1 «Preparación antes del primer uso».

2.3 ATENCIÓN DURANTE EL USO

- La IZYCHAIR se puede conducir sobre una superficie plana y lisa, pero no sobre carreteras húmedas, desniveladas, blandas, angostas, heladas o peligrosas, sin guardarraíles o caminos.
- La capacidad de salvar obstáculos de la IZYCHAIR es limitada. Cuando Ud. llega a un obstáculo, debe reducir la velocidad y proceder lentamente.
- La IZYCHAIR tiene una capacidad de subida limitada. El ángulo de pendiente es de $\geq 30^\circ$.
- Evite el uso de la silla en situaciones de mucho tráfico y multitud.
- Por favor, asegúrese que el sistema de control está instalado de manera segura. La posición del joystick debe ser vertical y la apropiada a su habilidad de conducción. Asegúrese de que su cinturón de seguridad está abrochado. Recuéstese hacia atrás tanto como le sea posible y apóyese contra el respaldo en caso de sacudidas repentinas e involuntarias durante la conducción.
- Pulse el botón de encendido, primero verifique que la velocidad máxima está ajustada a su nivel de conducción. En caso contrario, por seguridad, la velocidad debe reajustarse. Le recomendamos que conduzca lentamente al principio de cada uso y después acelere gradualmente.



¡ATENCIÓN!

Si su silla de ruedas se mueve involuntariamente, suelte el joystick inmediatamente: la silla se parará automáticamente. Si el joystick no funciona correctamente y el freno falla, corte la electricidad.



¡PRECAUCIÓN!

Cuando la silla llegue a una pendiente, tire de la palanca hacia arriba o resbalará lentamente, lo que resultaría en daños personales.

2.4 INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS

Su silla de ruedas puede pasar por zonas afectadas por las interferencias electromagnéticas de algunos transmisores, como radios, interfonos inalámbricos, teléfonos móviles y radares, etc. En estos casos, la capacidad de conducción de la silla puede verse afectada. Las interferencias electromagnéticas pueden afectar al control del sistema de esta silla de ruedas eléctrica. Algunas perturbaciones pueden causar un fallo en los frenos o en el arranque, o bien movimientos involuntarios, y pueden provocar daños permanentes al sistema de control.

Clasificación de las Interferencias Electromagnéticas

- Transceptores de radio de banda corta. Estas radios tienen antena, como las ondas de radio en las frecuencias urbanas, walkie-talkies, sistemas de redes móviles y aparatos de transmisión de señales.
- Transceptores móviles de radio de banda media. Este tipo está habitualmente instalado en edificios o en el exterior; en la antena de un vehículo. Por ejemplo, policía, bomberos, taxis, ambulancias u otros transceptores.
- Transceptores de banda ancha. Éstos suelen estar instalados en la antena de una torre, por ejemplo, en sistemas de transmisión de radios o televisiones comerciales.



¡ATENCIÓN!

La silla y el cargador de baterías cumple el siguiente código estándar: **GB / T 18029.21 Silla de Ruedas - Parte 21: Requerimientos y métodos de ensayo para compatibilidad electromagnética de scooters eléctricos y cargadores de baterías.**



¡ATENCIÓN!

La silla puede verse afectada por Interferencias Electromagnéticas (EMI) durante la conducción. Tal interferencia puede ser de teléfonos móviles, sistemas EAS, etc.

Prevención de interferencias electromagnéticas

- No use transmisores portátiles de radio, como teléfonos móviles, radios, etc. cuando la silla de ruedas está encendida.
- Evite estar cerca de sistemas de transmisión de radio, como emisoras de radio o de televisión.
- Si la alimentación eléctrica de la silla es defectuosa o los frenos fallan, por favor, contacte con su proveedor o distribuidor.

III. ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO


3.1 ESQUEMA DE LA IZYCHAIR

La IZYCHAIR se compone de las partes principales, que incluyen ruedas delanteras, ruedas motrices, armazón, controlador, motor, reposabrazos, mangos de empuje, respaldo, superficie de asiento, reposapiés, caja de la batería y cargador. El esquema se muestra en la Figura 1.



fig. 1

3.2 DIAGRAMA ELÉCTRICO DE N5519

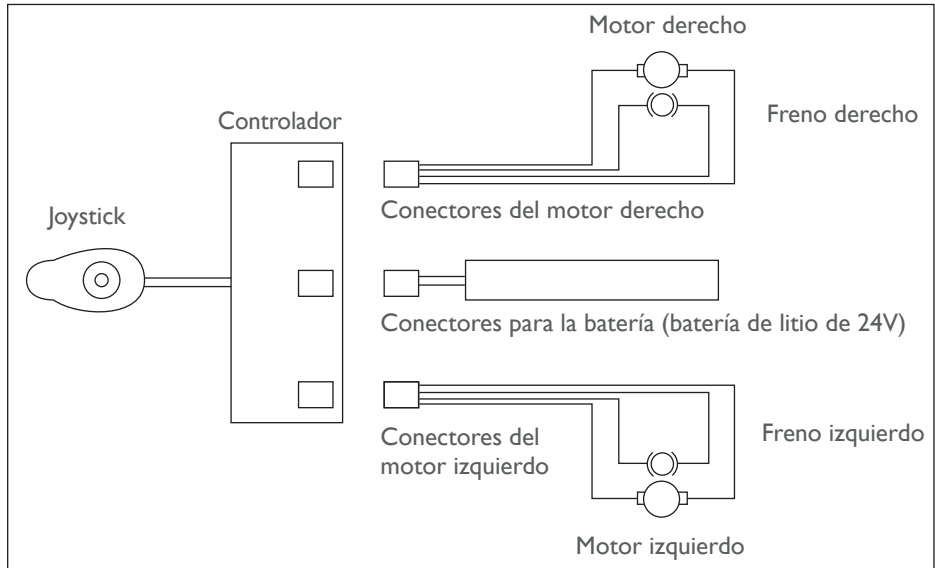

3.3 VERSIÓN DEL SOFTWARE DEL PRODUCTO

La versión del software de la Silla de Ruedas Eléctrica N5519 es la V1.8.

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Las especificaciones principales incluyen el tamaño y el peso.

Accesibilidad	interior
Configuración	2 ruedas motrices traseras
Dimensiones generales	longitud: 890mm
	anchura: 560mm
	altura: 890mm
Dimensiones silla plegada	320mm x 680mm x 690mm
Altura asiento	460mm
Anchura asiento	420mm
Profundidad asiento	400mm
Altura reposabrazos	250mm
Altura respaldo	420mm
Peso batería	1kg
Peso silla	15,8kg con batería
Peso máximo usuario	100kg
Velocidad	4,5km/h
Distancia de frenado	100cm
Radio de giro	90cm
Anchura media vuelta	100cm
Estabilidad estática	6°
Estabilidad dinámica	3°
Habilidad pendientes	3°
Pendiente máxima	3°
Franqueamiento de obstáculos	2,5cm
Autonomía	10km
Motores	150W x 2
Batería Litio	24V 6Ah
Electrónica	MICON
Carga baterías	mediante joystick
Ruedas delanteras	150mm
Ruedas traseras	300mm
Suspensiones	ruedas delanteras

V. INSTALACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE

5.1 INSTALACIÓN

- Saque la silla de ruedas de la caja de embalaje y póngala en el suelo. Despliegue el armazón, presionando a derecha e izquierda; luego empuje hacia abajo los dos tubos situados en ambos lados de la superficie de asiento, de manera que coincidan con las muescas situadas en ambos lados del armazón de la silla (Fig. 2).
- Tire hacia arriba de las asas y bloquee el dispositivo de plegado (Fig. 3).
- Ponga el controlador en el reposabrazos. Cierre la llave de tuercas en el controlador para asegurar el controlador (Fig. 4).
- Instale los reposapiés en el armazón y luego apriételes (Fig. 5).

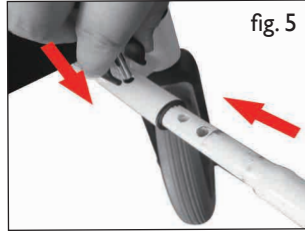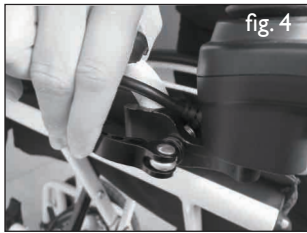


5.2 DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO

- Por favor, proceda de acuerdo a los siguientes métodos de transporte y almacenamiento de la IZYCHAIR:
- Ponga la silla de ruedas en un suelo llano y apague el suministro de electricidad.
- Gire el reposapiés 90° hacia arriba (Fig. 6).
- Pulse los botones situados en cada lado del respaldo con su dedo índice para soltar el respaldo y poder sacar los mangos de empuje (Fig. 7).
- Levante el cojín de asiento (Fig. 8), para de poder plegar el armazón desde ambos; también podrá llevarla con las dos correas situadas en ambos lados del asiento (Fig. 9).

5.3 AJUSTE

- Cuando se empuja hacia abajo la palanca de bloqueo del motor, pasa a estar en modo manual, lo que significa que la silla puede ser empujada manualmente por un asistente. Cuando se estira hacia arriba la palanca de bloqueo del motor, la silla está en modo eléctrico y no puede ser empujada manualmente (Fig. 11).
- Pulse el botón de encendido del joystick, el indicador luminoso de la batería se encenderá.
- Gire la palanca del joystick hacia adelante, observe el giro de las ruedas de la silla de ruedas y luego gire en la otra dirección para observar si hay rotación de ruedas.
- Debe observar que las ruedas se paren.
- Los reposabrazos se pueden levantar, facilitando así la entrada y salida de la silla (Fig. 10).

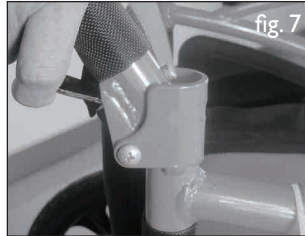

VI. USO Y FUNCIONAMIENTO

6.1 USO

6.1.1 Controlador:

Es el componente clave de la silla de ruedas. Toda la electrónica que funciona en ella está ubicada en el controlador (Fig. 12). Normalmente, el controlador está instalado en uno de los reposabrazos y se conecta a un motor y a una batería en la caja de alimentación.



fig. 12

- **Interruptor:** El interruptor suministra la electricidad al sistema de control del equipo electrónico, luego éste suministra la electricidad al motor de la silla. No use el interruptor para detener la silla, a menos que se trate de una emergencia. De lo contrario, la duración de los componentes de conducción de silla podría acortarse.
- **Joystick:** El joystick es usado principalmente para controlar el movimiento de la silla, incluidas su velocidad y dirección (adelante, atrás y hacia la derecha o izquierda, etc.). Cuanto más empuje hacia adelante el joystick desde su posición central, más rápido se moverá la silla. Cada vez que suelte el joystick, éste volverá automáticamente al centro y el freno detendrá automáticamente la silla.
- **Botón de la bocina:** Si Ud. pulsa este botón, la bocina sonará.
- **Botones Acelerar/Ralentizar y Velocímetro:** Después de activar la electricidad, el velocímetro muestra la velocidad máxima establecida en ese momento. El usuario puede ajustar esta velocidad máxima establecida mediante los botones Acelerar y Decelerar.
- **Toma del cargador:** Sólo debe ser usada para esta silla. No use la toma para proveer de electricidad ningún otro equipo eléctrico. De lo contrario, el sistema de control de la silla o su rendimiento E.M.C (tolerancia electromagnética) podrían resultar dañados.



¡ATENCIÓN!

Si su silla de ruedas se mueve accidentalmente, suelte el joystick inmediatamente y la silla se parará automáticamente.



¡PRECAUCIÓN!

Si conecta en la toma cualquier otro aparato que no sea el cargador de baterías que se suministra, causará daños al sistema de control e invalidará la garantía.

6.1.2 Uso de la Batería

Cargue completamente su batería antes del primer uso. Esto carga la batería aproximadamente hasta el 90% de su nivel máximo de rendimiento. De a la batería otra carga total de 8-14 horas y ponga en marcha la silla de nuevo. Esta vez, las baterías rendirán por encima del 90% de su potencial. Después de cuatro o cinco ciclos de carga, las baterías alcanzarán el 100% de la carga y durarán por un tiempo amplio. Por favor, cuando falle una batería, reemplácela por una nueva y devuélvala al proveedor; para evitar polucionar el medio ambiente de manera innecesaria.



¡PRECAUCIÓN!

No use la silla de ruedas cuando la temperatura sea inferior a -25° o superior a 50°.

Especificaciones técnicas de la batería	
Tipo	Batería de litio
Dimensiones	162mmx145mmx44mm
Tensión	24V
Amperio-hora	6Ah

6.1.3 Cargar las baterías

El cargador de baterías es una parte importante de la silla de ruedas. El cargador externo adjunto a este producto puede cargar sus baterías rápida y fácilmente y de este modo optimizar el uso de su silla de ruedas.



¡ATENCIÓN!

La carga de 24V/2A suministrada por nuestra empresa es conforme al requerimiento mencionado en la Sección I «Requerimientos Generales de Seguridad» GB9706.1-2007 de los equipos eléctricos médicos. Se debe cargar la batería con el cargador que le suministramos. Cualquier otro tipo de cargador está prohibido.



¡PRECAUCIÓN!

Nunca deje que la batería se enfríe, no cargue una batería congelada, ya que podría provocar daños personales y desperfectos en la batería.

Cargar las baterías usando el cargador externo que le suministramos:

- Verifique que el controlador está apagado y que la silla de ruedas está en modo conducción.
- Conecte la clavija de salida de 3 polos del cargador al controlador (Fig. 13).
- Conecte la toma de alimentación del cargador al enchufe de pared estándar.
- El LED rojo de las luces del cargador indica que la batería se está cargando. El LED verde del cargador se enciende cuando las baterías están totalmente cargadas.
- Le recomendamos que cargue sus baterías durante 8-12 horas.
- Quite el cargador y el enchufe cuando las baterías estén totalmente cargadas y póngalas en la bolsa situada detrás del respaldo.

6.1.4 Sobrecarga



El protector de sobrecarga, situado en la caja de baterías, está diseñado para la seguridad de la silla de ruedas. En cuanto el motor o las baterías se sobrecargan, el protector de sobrecarga provocará el corte del suministro eléctrico. Pasados uno o dos minutos, se reiniciará automáticamente y podrá seguir conduciendo la silla de ruedas.

6.1.5 Palanca de freno

Cuando quiera parar, suelte el joystick: la silla se parará inmediatamente.

6.1.6 Cinturón de seguridad

Para su seguridad, antes de empezar a conducir la silla de ruedas debe abrocharse el cinturón de seguridad. (fig. 14)

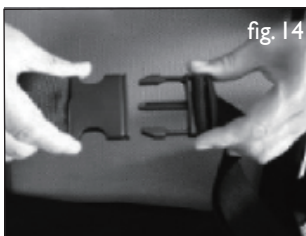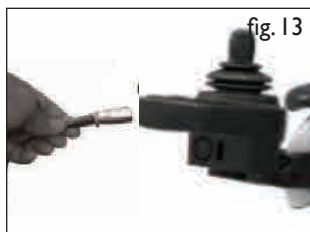


6.2 FUNCIONAMIENTO

6.2.1 Preparación antes del funcionamiento

- No active el interruptor cuando esté sentándose en la IZYCHAIR y no lo apague cuando esté saliendo de la silla de ruedas.
- Por favor, verifique si el freno de mano funciona o no.
- Por favor, pliegue el pedal antes de sujetar el reposabrazos para sentarse en la silla de ruedas. No salga de la silla de ruedas mientras esté pisando el pedal.
- De lo contrario, la silla podría volcar, con el peligro que ello supone.
- Otherwise the chair may tip over, which is dangerous.

6.2.2 Práctica antes del funcionamiento

- Encuentre un lugar espacioso, por ejemplo una plaza, y tenga un asistente para ayudarlo a practicar hasta que tenga suficiente confianza para conducir solo.
- Asegúrese de que la electricidad está apagada cuando entre y salga de la silla y establezca una velocidad con la que Ud. se sienta cómodo.
- Le recomendamos que establezca la velocidad mínima hasta que pueda maniobrar con la silla de manera competente.
- Para practicar la parada, empuje del asa hacia adelante y hacia atrás: la silla se moverá hacia donde Ud. quiera.
- Cuando practique la marcha adelante, asegúrese primero de que está a la velocidad mínima. Cuando tenga más dominio, podrá practicar giros en forma de «S». Cuando se haya familiarizado con la forma «S», practique la marcha atrás, prestando atención al ajuste del control de la velocidad. La velocidad en marcha atrás debe ser menor que la velocidad en marcha adelante.

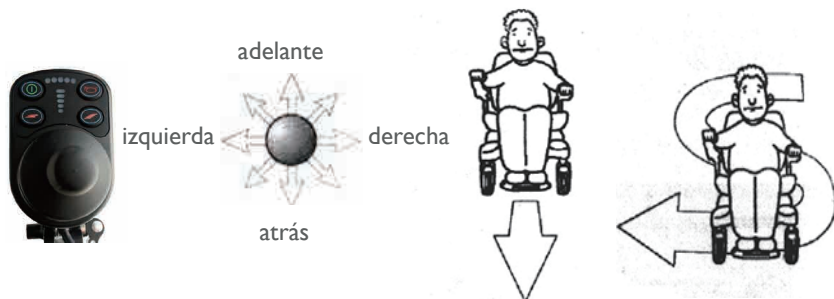

¡ATENCIÓN!

No use su silla de ruedas en modo manual a menos que tenga la ayuda de un asistente. Lo contrario podría resultar en daños personales.



¡ATENCIÓN!

No ponga su silla de ruedas en modo manual Ud. mismo cuando esté sentado en la silla. De otro modo, podría provocar daños personales. En este caso, pida ayuda a su asistente.



¡ATENCIÓN!

No ponga su silla de ruedas en modo manual Ud. mismo cuando esté en una pendiente. De otro modo, la silla podría perder el control y rodar pendiente abajo por sí misma y provocar daños personales.

VII. FALLO DE DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para su comodidad, este producto tiene una función de aviso automático de fallo. En cuanto funciona defectuosamente, los LEDs del controlador se encenderán y sonará una alarma (bocina). Puede ver dónde está el fallo usando la información de la Tabla 2.

Si el problema persiste después de verificar el fallo, basándose en la información de la Tabla 2, no use la silla de ruedas. Por favor, apague la alimentación eléctrica y consulte a su servicio de atención al cliente inmediatamente.

Indicador LED	Diagnóstico de Avería	Solución	Observaciones
La bombilla LED 1 está encendida	La batería está baja	Cargue la batería	
La bombilla LED 2 está encendida	Fallo del motor izquierdo	Compruebe el motor y el cableado	
La bombilla LED 3 está encendida	Fallo del freno izquierdo	Compruebe que la palanca de freno esté en la posición correcta y si hay algún daño en el freno.	
La bombilla LED 4 está encendida	Fallo del motor derecho	Verifique el motor y el cableado	
La bombilla LED 5 está encendida	Fallo del freno derecho	Verifique que la palanca de freno esté en la posición correcta y si hay algún daño en el freno.	
La bombilla LED 6 está encendida	Sobrecarga del controlador	Compruebe que el freno está libre y que las ruedas están bloqueadas.	
La bombilla LED 7 está encendida	Fallo del joystick	Compruebe que la palanca del controlador esté en posición central.	
La bombilla LED 8 está encendida	Fallo del controlador	Avería del controlador	
La bombilla LED 9 está encendida	Fallo del controlador	Avería del controlador	

VIII. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE ACCIDENTES

- Protector de sobrecarga: véase el punto 6.1.4 del manual de instrucciones.
- Cinturón de seguridad: véase el punto 6.1.6 del manual de instrucciones.
- En cuanto se produzca un fallo de la silla de ruedas, suelte el joystick. La silla se parará.

IX. MANTENIMIENTO

Como otros vehículos motorizados, su silla de ruedas eléctrica requiere un mantenimiento de rutina. Ud. mismo puede realizar algunas comprobaciones; para otras, deberá pedir ayuda a su agente de atención al cliente. El mantenimiento preventivo es muy importante. Si Ud. sigue el mantenimiento y los chequeos que se aconsejan en esta sección, su silla de ruedas le proporcionará años de funcionamiento sin averías. Si tiene alguna duda sobre el cuidado o el funcionamiento de su silla de ruedas, por favor, contacte con su agente de atención al cliente o nuestro departamento de servicio postventa.

9.1 HUMEDAD

Su silla de ruedas, como la mayoría de equipos mecánicos y eléctricos, es susceptible a las condiciones externas. En cualquier caso, la silla de ruedas debe evitar estar en un entorno húmedo. La prolongación directa o prolongada al agua o a la humedad puede provocar que la silla de ruedas no funcione correctamente, eléctrica o mecánicamente. El agua puede causar la corrosión de los componentes eléctricos o del armazón de la silla.

9.2 TEMPERATURA

- Algunas partes de la silla de ruedas son sensibles a los cambios de temperatura.
- En temperaturas extremadamente bajas, la batería podría congelarse. Temperaturas inusuales pueden causar la congelación de componentes como el cargador y la batería (como las baterías de plomo-ácido precintadas o las baterías de gel).
- Temperaturas por encima de los 55o pueden provocar una disminución de la velocidad de la silla.

9.3 REGLAS GENERALES

- Evite golpear el controlador, especialmente el joystick.
- Evite la prolongación de la exposición de su silla de ruedas a condiciones extremas, como entornos de calor, frío o humedad.

- Mantenga limpio el controlador.
- Verifique todas las conexiones eléctricas, incluyendo el cable y los conectores del cargador, y asegúrese de que están todos ajustados y seguros.
- Si sólo visualiza LEDs rojos en las luces del contador de la batería, las baterías están agotándose. Debe recargar las baterías tan pronto como le sea posible. Recomendamos cargar las baterías durante unas 8-12 horas.
- Verifique el hinchado de las ruedas traseras: si el neumático parece deformado cuando conduce, debe ser hinchado.
- La superficie del armazón ha sido impregnada con una capa selladora clara. Puede aplicar una fina capa de cera de coche para mantener esta superficie brillante.
- Compruebe todas las conexiones de los cables. Asegúrese de que los cables están bien sujetos y de que no están oxidados. La batería debe colocarse en la zona de baterías, plana, con el enchufe de la batería hacia adentro y la batería visualizada. Véase la conexión correcta en la etiqueta del armazón principal.
- Todos los cojinetes de las ruedas han sido lubricados y sellados. No hay necesidad de lubricarlos.
- Verifique si hay partes sueltas (poco apretadas), como el eje de la rueda, el dispositivo de conducción y o la propia silla. Si las hubiera, atornillelas fuertemente.



¡ATENCIÓN!

Asegúrese de que la presión de los neumáticos está dentro del rango 230KPa±10%. Hinche los neumáticos con una fuente de aire regulada y verifique la presión con un manómetro. No exceda el rango de presión; de otro modo, los neumáticos podrían estallar o provocar daños personales.

9.4 MANTENIMIENTO DESPUÉS DEL USO

- Apague la electricidad (si no va a usarla durante un largo período, desconecte todos los conectores).
- Los niños y las personas con poco cuidado no deben usar la silla de ruedas.
- Guarde la silla de ruedas en condiciones normales de temperatura, afín de prevenir deformaciones y así como mantener su rendimiento durante largo tiempo.
- Limpie y seque la silla de ruedas con un paño fino y suave. Nunca use productos químicos para limpiarla (como prevención de deformaciones y decoloraciones).
- Quite la funda de tela del respaldo del asiento y límpiela si está sucia. Séquela antes de usar.

9.5 CHEQUEOS DIARIOS

A fin de mantener la silla de ruedas en buenas condiciones, debe chequearla antes de cada uso. Para realizar los mantenimientos semanales, mensuales y bianuales, véase la Tabla III.

Ítem a inspeccionar	En cualquier momento	Semanalmente	Mensualmente	Bianualmente
Todas las partes			•	
Función del joystick	•			
Sistema de frenado	•			
Conexión		•		
Estado de la batería	•			
Estado de los neumáticos			•	
Estado del armazón				•
Estado de las ruedas delanteras		•		
Limpieza	•			

9.6 LIMPIEZA

Instrucciones de limpieza:

- No lave nunca su silla de ruedas con agua ni la esponja directamente al agua.
- La superficie del armazón de la silla de ruedas está sellada con una capa protectora.

Por lo tanto, es muy fácil de mantener limpio con un paño húmedo. No use nunca productos químicos para limpiar el asiento de vinilo y los reposabrazos, ya que podrían volverse resbaladizos o agrietarse. Puede usar un paño húmedo y agua y jabón neutro para limpiarlos y luego secarlos totalmente.

X. REPARACIONES

- Los usuarios pueden necesitar reparar o sustituir algún repuesto, como los mangos de empuje y sus fundas, que pueden ser reparados o reemplazados por los usuarios, bajo las instrucciones del personal del servicio posventa o de nuestros distribuidores.
- Bajo garantía, nuestra empresa o nuestro distribuidor repararán o sustituirán las piezas defectuosas, como el motor, la batería, el cargador, el controlador, los cojinetes, etc. Cuando sea debido a defectos de fabricación o del material, este reemplazo se realizará sin coste alguno.
- Las piezas de repuesto como el motor, el controlador, etc., que son verificadas por el personal de nuestro servicio posventa o por nuestro distribuidor, pueden enviarse a nuestra empresa para su mantenimiento.
- Por favor, contacte con su distribuidor o con el departamento de servicio posventa de nuestra compañía para cualquier pregunta relacionada con el mantenimiento de sillas de ruedas eléctricas. Por favor, consulte el punto XIII. Garantía del Producto.



¡PRECAUCIÓN!

En el caso de que partes como las baterías, los neumáticos, el controlador, los motores, el cargador, etc. necesitaran ser reemplazadas, y afín de garantizar la calidad de la silla de ruedas, por favor, contacte con nosotros o con nuestros distribuidores para sustituir las piezas por los mismos modelos y con las mismas especificaciones técnicas. El mantenimiento debe llevarse a cabo en nuestra empresa o en el departamento de mantenimiento de nuestros distribuidores.

XI. ALMACENAMIENTO

Su silla de ruedas puede ser guardada en un lugar seco, libre de fuentes de temperatura extrema y humedad. Saque las baterías de la silla de ruedas antes de almacenarla. De lo contrario, el armazón podría oxidarse y la electrónica podría resultar dañada.

XII. APERTURA Y VERIFICACIÓN

Abra la caja de embalaje y verifique que ningún elemento esté dañado o falte.

Lista de embalaje:

No.	Nombre	Cantidad	Observaciones
1	Silla de ruedas eléctrica	1	Modelo: N5519
2	Cargador	1	Modelo: HP0060WL2/60HZ 24v2A
3	Manual de Instrucciones	1	
4	Reposapiés	2	
5	Controlador	1 set	

XIII. GARANTÍA

13.1 GARANTÍA DE CINCO AÑOS

Nuestra compañía ha superado la norma ISO9001 y el certificado ISO13485. La calidad está garantizada.

13.2 CUBIERTO POR LA GARANTÍA

Cinco años de garantía para los armazones principales, delantero y trasero, a partir de la fecha de compra.

Un año de garantía para las siguientes partes, a contar desde la fecha de compra:

- El sistema de Control Eléctrico y el controlador
- El montaje del motor/caja de cambios
- El cargador
- La batería de litio

El servicio de garantía debe realizarse por parte de su proveedor en cooperación con nuestro departamento posventa.

13.3 NO CUBIERTO POR LA GARANTÍA

- La envoltura ABS y las almohadillas de goma
- Los neumáticos
- El Armazón y la tapicería
- Los daños causados por abuso de mal uso, accidente o negligencia
- Los daños causados por un funcionamiento, mantenimiento o almacenamiento incorrectos.
- Negocio u otro uso anómalo.

IzyCHAIR

by

LOGO  SILVER
by **AMYLOR**

Logo Silver

32 rue de Comboire - 38130 Echirolles - France
Tél. +33(0)4 76 21 22 19 - contact@logo-silver.fr

www.logo-silver.fr